

Biatain® Silicone Non-Border

Guia de Recorte

Desenvolvido por enfermeiros para enfermeiros





Súmario

Pés	4 - 7
Pés e Mãos	8 - 9
Mãos	10 - 12
Axilas	13
Pescoço e ao redor da Mama	14
Orelha	15

Dedão do pé (hálux) ou polegar



Dedão do pé (hálux) ou polegar




Para feridas no dedão do pé

Tamanho do produto sugerido: 10 x 10 cm.

Dobrar o produto e recortar um formato triangular. Aplicar o produto entre o hálux e o segundo dedo do pé e dobrar ao redor do hálux antes de fixar com bandagem secundária adequada. Abordagem semelhante pode ser utilizada para aplicação no polegar.

Como recortar:

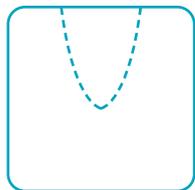

Escaneie o QR CODE para assistir o vídeo sobre como cortar

Para feridas no dedão do pé

Tamanho do produto sugerido: 10 x 10 cm.

Recorte as duas extremidades do produto e aplique o produto a partir do lado interno do hálux antes de fixar com a cobertura secundária adequada. Uma abordagem semelhante poderá ser utilizada para aplicação no polegar.

Como recortar:



Escaneie o QR CODE para assistir o vídeo sobre como cortar

Dedos do pé




Para feridas na ponta dos dedos do pé.

Tamanho do produto sugerido: 10 x 10 cm.

Recorte o produto em um formato de cruz.
Considere atentamente o tamanho do dedo e as dimensões do produto cortado para o formato ideal. Fixar com cobertura secundária adequada.

Como recortar:

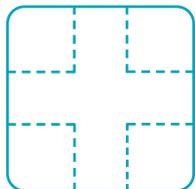

Escaneie o QR CODE
para assistir o vídeo
sobre como cortar

Entre os dedos do pé



Para feridas entre os dedos do pé.

Tamanho do produto sugerido: 15 x 15 cm.

Dobre o produto e corte incisões/orifícios de acordo com o número de dedos do pé a serem cobertos. Fixar com cobertura secundária adequada.

Como recortar:



Escaneie o QR CODE
para assistir o vídeo
sobre como cortar


Entre os dedos do pé e da mão



Para feridas entre os dedos do pé e da mão.
Tamanho do produto sugerido: 10 x 10 cm.

Recorte um formato arredondado a partir de ambos os lados do produto. Considere arredondar as extremidades para melhor ajuste. Aplicar entre os dedos. Fixar com bandagem secundária adequada.

Como recortar:

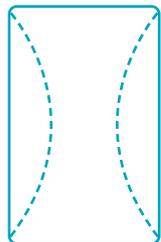

Escaneie o QR CODE para assistir o vídeo sobre como cortar


Entre os dedos do pé e da mão



Para feridas entre os dedos do pé e da mão.
Tamanho do produto sugerido: 10 x 10 cm.

Recorte o produto em formato de cruz. Considere atentamente o tamanho dos dedos e as dimensões do produto recortado para o formato ideal. Fixar com cobertura secundária adequada.

Como recortar:

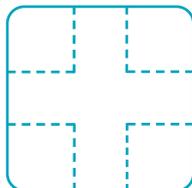

Escaneie o QR CODE para assistir o vídeo sobre como cortar


Ao redor dos dedos da mão



Para feridas entre os dedos da mão.
Tamanho do produto sugerido: 10 x 10 cm.

Dobre o produto ao redor de 1/3 no lado longo e corte um orifício no produto para se ajustar ao dedo. Se necessário, ajustar os lados do produto para que se ajuste entre os dedos. Fixar com cobertura secundária adequada.

Como recortar:

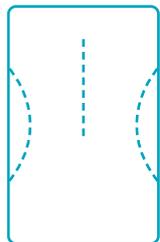

Escaneie o QR CODE para assistir o vídeo sobre como cortar

Palma da mão



Para feridas na palma da mão.
Tamanho do produto sugerido: 10 x 20 cm.

Dobre o produto no 1/3 inferior e corte orifícios para ajuste nos três dedos do meio. Retire o produto excedente e em seguida corte ao redor da incisão para ajustar ao redor da base do polegar. Fixe com cobertura secundária adequada.

Como recortar:



Escaneie o QR CODE para assistir o vídeo sobre como cortar

Dorso e na palma da mão



Para feridas no dorso e na palma da mão.
Tamanho do produto sugerido: 15 x 15 cm.

Corte um orifício na extremidade direita superior de um tamanho adequado para se ajustar ao dedo indicador. Em seguida, recorte uma extremidade arredondada para ajustar o formato da mão. Fixe com cobertura secundária adequada.

Como recortar:



Escaneie o QR CODE para assistir o vídeo sobre como cortar


Axila



Para feridas ao redor da axila.
Tamanho do produto sugerido: 15 x 15 cm.

Recorte um formato arredondado para que a cobertura se ajuste próxima à axila. Fixar com cobertura secundária adequada ou fita adesiva apropriada.

Como recortar:

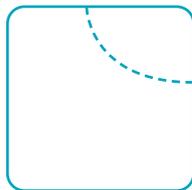

Escaneie o QR CODE para assistir o vídeo sobre como cortar


Pescoço e abaixo da mama



Para feridas no pescoço e ao redor ou abaixo da mama.
Tamanho do produto sugerido: 10 x 20 cm.

Corte inserções a partir de dois lados do produto para que se ajuste ao corpo. Fixe com cobertura secundária adequada ou fita adesiva apropriada.

Como recortar:

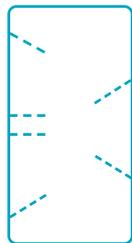

Escaneie o QR CODE para assistir o vídeo sobre como cortar


Orelha



Para feridas ao redor da orelha.
Tamanho do produto sugerido: 10 x 10 cm.

Recorte a cobertura para que corresponda ao formato da orelha. Fixe com uma cobertura secundária adequada ou fita adesiva apropriada.

Como recortar:

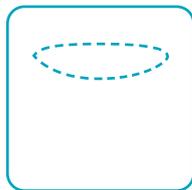

Escaneie o QR CODE para assistir o vídeo sobre como cortar

