

A Revisão do Ostomy Life Study é uma publicação recorrente desenvolvida pela Coloplast com apoio de enfermeiros especializados do Fórum Global de Estomia da Coloplast

O que são perfis corporais periestomais e por que falar sobre isso?

No ano de 2010, a Coloplast conduziu um estudo de pesquisa de mercado¹ que mostrou que, 6 anos após a alta, 74% das pessoas com uma estomia reportaram vazamentos mensais. Dessa forma, os problemas de vazamento em pessoas dependentes de produtos de estomia ainda não estão resolvidos. Por quê? Talvez porque seja difícil encontrar os produtos de estomia corretos, que se adaptem de maneira ideal a diferentes corpos, com diferentes necessidades.¹ Portanto, a Coloplast prometeu, desde então, focar mais em soluções de “Ajuste ao Corpo”.

Uma linguagem padrão era necessária – e, em cooperação com enfermeiros especializados do Fórum Global de Estomia da Coloplast, “nasceu” a Terminologia do Perfil Corporal.

Seguindo as definições estabelecidas pela Terminologia do Perfil Corporal², o perfil corporal periestomal pode ser descrito como “Regular”, “Irregular (Inward)” ou “Abaulado (Outward)”. Para acompanhamento da pesquisa de mercado de 2010, a Coloplast conduziu dois Ostomy Life Study, um em 2014³ e o recente Ostomy Life Study de 2016.

O Ostomy Life Study de 2016⁴ se aprofundou em relação àquilo que caracteriza indivíduos com diferentes perfis corporais periestomais em termos de complicações e escolha de produtos para estomia. O Ostomy Life Study de 2016⁴ inclui mais de 4000 pessoas com estomia de todo o mundo.

A partir dos achados, parece claro que as pessoas com um perfil corporal periestomal “desafiador” (isto é, caracterizado como irregular (inward) ou abaulado (outward) têm muito em comum e lidam com desafios muito específicos. Também está claro que uma única solução em produtos para estomia, certamente não é suficiente para atender as diferentes necessidades.

Achados em pessoas com perfil corporal periestomal desafiador:

- Entre as pessoas com estomia, uma porcentagem maior apresenta vazamentos “diariamente ou semanalmente” e se preocupam com o vazamento em um grau alto ou muito alto, aquelas com perfis corporais periestomais irregulares ou abaulados.
- Pessoas com perfis corporais periestomais regulares e abaulados usam principalmente equipamentos de base adesiva plana, enquanto pessoas com perfis corporais periestomais irregulares usam principalmente um equipamento convexo.
- Vazamento e preocupação com vazamento levam a menos atividades físicas que pode estar associado a problemas de peso corporal.
- Os perfis corporais periestomais abaulados ou irregulares estão altamente representados entre pessoas obesas ou com sobrepeso, o que pode aumentar o desafio de encontrar a solução perfeita para cada necessidade individual.
- Esses achados do Ostomy Life Study de 2016⁴ ressaltam como os perfis corporais individuais têm diferentes necessidades em termos de produtos de estomia, mas também gera reflexão sobre o alto impacto das complicações e desafios associados, como a experiência de vazamento, sobre a qualidade de vida⁶ e a necessidade do uso de adjuvantes⁴.


Dados do Ostomy Life Study destacam claramente a necessidade de desenvolver produtos de estomia que atendam às necessidades específicas dos indivíduos com perfis corporais periestomais mais desafiadores.

Sobrepeso e obesidade são mais comuns entre perfis corporais periestomais irregulares e abaulados.

P: Qual seu peso e altura atuais?

MC Calculado


- Obeso
- Sobrepeso

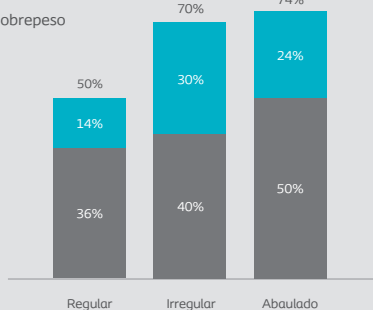

Pessoas com perfis corporais periestomais irregulares e abaulados apresentam vazamento mais frequentemente


P: Com que frequência você apresenta vazamento?

- Regular
- Irregular
- Abaulado

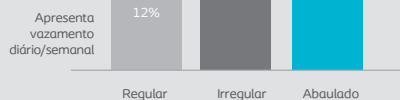


Pessoas com perfil corporal periestomal irregular são muito mais propensas a usar uma base convexa.

P: A parte do seu equipamento de estomia que adere à pele (a base) é plana ou convexa?

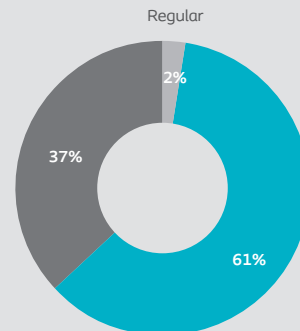


Plana Convexa Ambos

Irregular

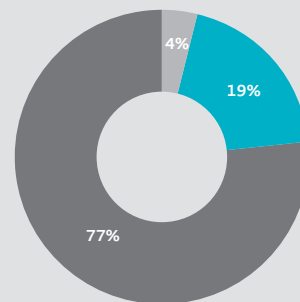

Plana Convexa Ambos

Abaulado

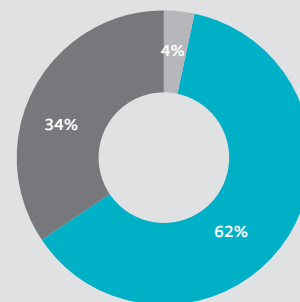


Plana Convexa Ambos

Analisando os perfis corporais periestomais, vemos que muitas pessoas não confiam em seu equipamento de estomia, o que pode levar a um impacto negativo na qualidade de vida.

P: Tendo em mente os últimos 7 dias, indique se você concorda ou discorda das afirmações relacionadas à sua confiança no uso de seu equipamento de estomia.

% de usuários que concordam plenamente/um pouco

- Regular
- Irregular
- Abaulado

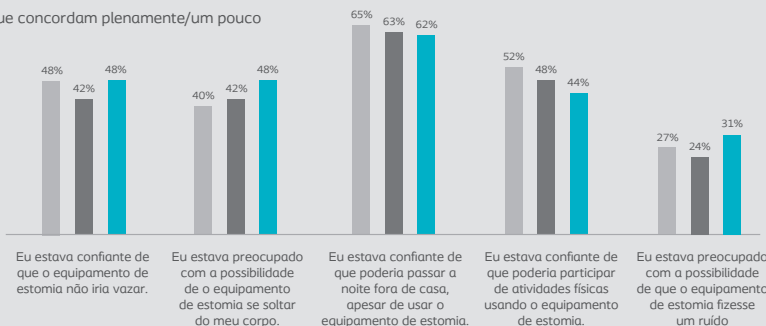


Mais de 90% de todas as pessoas com uma estomia usam adjuvante; no entanto, o tipo de adjuvante usado varia dependendo do perfil corporal periestomal individual

P: Quais dos seguintes adjuvantes você usa?

É permitido selecionar múltiplas opções.

- Regular
- Irregular
- Abaulado

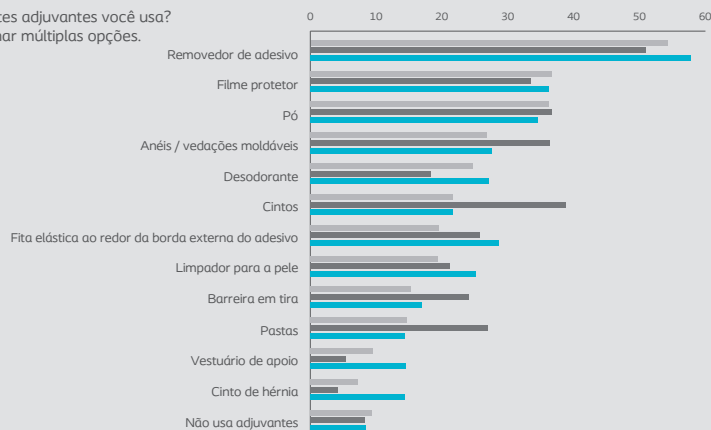

Sources: ¹Coloplast Market Research, 2010, Data on file; ²Ostomy Life Study 2015/16 Review. ³Claessens et al., 2015, GIN; ⁴Coloplast Ostomy Life Study, 2016, Data on file; ⁵Coloplast Usage Pattern Study, 2015, Data on file; ⁶Ostomy Life Study 2016/17, Review (p 10-11).



Quer saber mais?

O objetivo do Ostomy Life Study é aumentar a conscientização sobre aspectos importantes do cuidado de pessoas com estomia, compartilhando dados empíricos, insights clínicos e tendências inspiradoras, a fim de melhorar o padrão de tratamento.